


TEST BUDDY™

SISTEMA DE MONITOREO
DE GLUCOSA EN LA SANGRE
PARA MASCOTAS

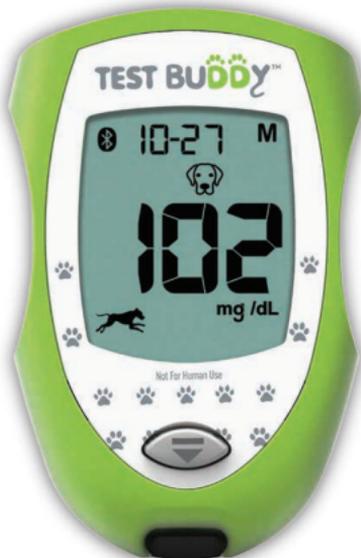

Instrucciones de uso

DISEÑO ESPECIALMENTE PARA PERROS Y GATOS

Únicamente para uso diagnóstico *in vitro*.
Para utilizar con muestras de sangre capilar
completa o sangre venosa completa
recién extraídas de perros o gatos.

NO APTO PARA USO EN HUMANOS.



Índice

Introducción.....	2
Componentes del sistema y accesorios.....	2
Información de seguridad importante	3
Aspectos básicos del sistema.....	4
Medidor.....	4
Tira de prueba	5
Solución de control	6
Cuidado y almacenamiento	6
Configuración del medidor.....	7
Configuración/Cambio del tipo de animal.....	9
Pruebas de glucosa en la sangre	10
Cómo obtener una muestra de sangre.....	10
Cómo realizar la punción	11
Cómo realizar la prueba de glucosa en la sangre	12
Cómo comprender los resultados de las pruebas de glucosa en la sangre.....	14
Pantalla de resultados Lo y Hi (bajos y altos).....	14
Memoria del medidor	15
Cómo ver los resultados.....	15
Cómo ver los promedios	15
Pruebas de control de calidad	16
Prueba autoadministrada automática	16
Prueba de solución de control.....	16
Limpieza y desinfección del medidor	20
Limpieza y desinfección del dispositivo de punción	22
Cambio de la batería	23
Resolución de problemas	24
Mensajes de error.....	25
Especificaciones del sistema.....	27
Acerca de la aplicación Test Buddy™	28
Acerca de Bluetooth SMART®	29
Seguridad y compatibilidad electromagnética del sistema	29
Bibliografía	30
Garantía limitada de por vida.....	30

Introducción

Uso previsto

El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy™ está indicado para el uso en el hogar y el uso profesional o en clínicas veterinarias a fin de monitorear la glucosa en la sangre en muestras extraídas de perros o gatos.

NO APTO PARA USO EN HUMANOS.

El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy está destinado únicamente al diagnóstico *in vitro* (fuera del cuerpo).

El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy está indicado para realizar pruebas con lo siguiente:

- Muestras de sangre capilar completa recién extraídas de la oreja o de la almohadilla de la pata.
- Muestras de sangre venosa completa recién extraídas recolectadas en un tubo con EDTA. Una extracción insuficiente en un tubo con EDTA que sea inferior a la mitad del volumen de llenado que se designó puede generar resultados bajos falsos.

El medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy se puede utilizar en varios perros y gatos. Las tiras de prueba y las lancetas son para un solo uso; no vuelva a utilizarlas.

Accesorios y componentes del sistema

- Medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy™
- Tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy™*
- Soluciones de control Test Buddy™ (niveles 1, 2 y 3)*
- Dispositivo de punción Healthy Tracks for Pets™*
- Lancetas Healthy Tracks for Pets™*

*Es posible que algunos elementos no estén incluidos en el kit, pero están disponibles para su venta por separado. Consulte la caja del medidor para saber qué elementos se incluyen.



Información de seguridad importante

¡ADVERTENCIA!

- El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy NO está indicado para realizar pruebas en humanos y NO dará resultados exactos si se utiliza en humanos.
- Este sistema contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas si se tragan. No ingiera ni permita que su mascota ingiera la tira de prueba, la batería, la solución de control ni ningún otro componente. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Después de abrir la caja de las tiras de prueba, examine el envase para detectar si hay piezas faltantes, dañadas o rotas. Verifique que la tapa esté bien cerrada. Si el envase está dañado o la tapa no está cerrada, no use las tiras de prueba, ya que pueden dar resultados inexactos. Comuníquese con Atención al cliente para solicitar un reemplazo.

Lea todas las instrucciones de uso (medidor, tiras de prueba, solución de control, dispositivo de punción) y realice los procedimientos de prueba antes de usar el sistema para medir los niveles de glucosa. Antes de monitorear la glucosa en la sangre, solicite asesoramiento a un veterinario.

No las use para detectar ni diagnosticar diabetes.

Los valores de la glucosa en la sangre se ven afectados por el estrés, las comidas, el ejercicio, el estado de salud y los medicamentos. La deshidratación grave y la pérdida de líquidos excesiva pueden generar resultados inexactos. **Nunca cambie el plan de tratamiento de su mascota sin consultar con un veterinario.**

Use las tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy y las soluciones de control Test Buddy únicamente con el medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy. Para informarse sobre cómo obtener las tiras de prueba y la solución de control, comuníquese con Atención al cliente.

Una vez utilizado el sistema, todas las piezas podrían transmitir patógenos contenidos en la sangre, incluso después de su limpieza y desinfección. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de punción, consulte las secciones *Limpieza y desinfección del medidor* y *Limpieza y desinfección del dispositivo de punción*.

Lávese bien las manos con agua tibia y jabón antes y después de manipular el medidor, el dispositivo de punción, las lancetas o las tiras de prueba, ya que el contacto con la sangre representa un riesgo de infección.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Aspectos básicos del sistema: medidor

Parte superior del medidor



- ⊕ Aumente los números en Configuración del medidor; desplácese hacia adelante por los resultados, los promedios, los marcadores de evento o la selección del animal.
- Ⓢ Encienda el medidor; acceda a Configuración del medidor; guarde las selecciones en Configuración del medidor; seleccione el tipo de animal; acceda a Memoria del medidor para ver los resultados y promedios.
- ⊖ Disminuya los números en Configuración del medidor; desplácese hacia atrás por los resultados, los promedios, los marcadores de evento o la selección del animal.


Parte posterior del medidor Compartimiento para la batería

Utiliza una batería de litio CR2032 3V no recargable.



Etiqueta del medidor Contiene el número de serie del medidor y el número de teléfono de Atención al cliente.

Parte frontal del medidor

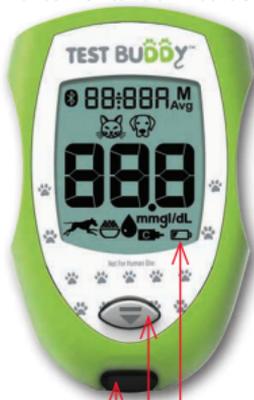

	Símbolo de Bluetooth		Marcador de evento de ejercicio - a prueba se tomó durante o después de hacer ejercicio
88:88	Hora/Fecha		Marcador de evento de comidas: Antes de las comidas - a prueba se tomó justo antes de una comida
A	La hora es AM o PM		Comida parcial - a prueba se tomó 2 horas después de comenzar una comida parcial
M	El resultado está en la memoria		Después de las comidas - a prueba se tomó 2 horas después de comenzar una comida
Avg	El resultado es un promedio de 7, 14, 30, 60 o 90 días.		Símbolo de gota (aplicar la sangre o solución de control)
	Tipo de animal (gato o perro)		Símbolo de control
888	Resultado de la prueba		Símbolo de batería baja
mmgI/dL	Unidad de medida: mg/dl (el usuario no puede cambiar la configuración de fábrica)		

Pantalla Muestra resultados, mensajes, instrucciones y otra información.

¡Importante! Antes de usar el medidor por primera vez, retire la cubierta protectora de plástico de la pantalla.

Botón de liberación de la tira Presiónelo para liberar la tira después de la prueba.

Puerto de prueba Inserte la tira de prueba aquí.

Aspectos básicos del sistema: tira de prueba

Punta para la muestra

Toque la parte de arriba de la gota de sangre o de la solución de control con la punta para la muestra.




Extremo de contacto

Inserte en el puerto de prueba del medidor con los bloques (contactos) orientados hacia arriba.

Etiqueta del envase de las tiras de prueba

(Únicamente a modo de ejemplo)

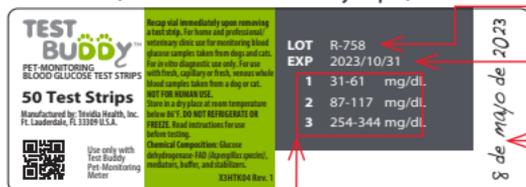

Número de partida

Fecha de vencimiento impresa

Cuando abra un envase nuevo, escriba la fecha en la etiqueta.

Rangos de solución de control El resultado de la solución de control debe estar dentro de este rango para el nivel que está usando. **Nota:** Este no es el rango objetivo para la glucosa en la sangre de su mascota.

Importante:

- **Antes de realizar la prueba, lea las Instrucciones de uso de las tiras de prueba.**
- Cierre el envase de inmediato después de retirar una tira de prueba.
- **No** aplique la gota de la muestra (sangre o solución de control) en la parte superior de la tira de prueba.
- **No** frote ni raspe la gota de la muestra con la tira de prueba.
- **No** aplique más muestra a la tira de prueba después de que comience la prueba.
- **No** inserte la punta para la muestra con sangre o con solución de control en el puerto de prueba del medidor, ya que esto puede dañar el medidor.
- **No** use las tiras de prueba después de su fecha de vencimiento. Cuando abra un envase nuevo de tiras de prueba, escriba la fecha en la etiqueta. Deseche las tiras de prueba después de la fecha de vencimiento impresa (**EXP**) o cuando haya pasado la fecha de vencimiento desde la apertura del envase, lo que suceda primero (consulte las *Instrucciones de uso de las tiras de prueba* para obtener información sobre cómo determinar la fecha de vencimiento desde la apertura del envase).
- **No** doble, corte ni altere las tiras de prueba de ninguna manera.
- Guarde las tiras de prueba únicamente en el envase original. **No** pase las tiras de prueba viejas a un envase nuevo ni las guarde fuera del envase.
- Guárdelas en un lugar seco a temperatura ambiente inferior a 86 °F (30 °C). **No las refrigere ni congele.**



Colocación correcta



Colocación incorrecta

Aspectos básicos del sistema: solución de control

La solución de control se utiliza para verificar que el sistema esté funcionando adecuadamente y que usted esté realizando la prueba de manera correcta.

Etiqueta del frasco de la solución de control (Únicamente a modo de ejemplo)

Nivel de la solución de control (1, 2 o 3)



← Cuando abra un frasco nuevo, escriba la fecha en la etiqueta.

Número de partida

← Fecha de vencimiento impresa

Importante:

- Antes de realizar la prueba, lea las *Instrucciones de uso de la solución de control*.
- Realice pruebas de control antes de realizar una prueba de glucosa en la sangre por primera vez (consulte la sección *Pruebas de control de calidad*).
- Después de cada uso, limpie la punta del frasco y ciérrelo bien.
- Guarde la solución de control a temperatura ambiente, entre 36 °F (2 °C) y 86 °F (30 °C). **No la refrigere ni congele.**
- Se recomienda realizar las pruebas con al menos dos niveles de solución de control. Para recibir ayuda sobre cómo obtener los diferentes niveles de solución de control, comuníquese con Atención al cliente.
- Cuando abra un frasco nuevo, escriba la fecha en la etiqueta. Deseche el frasco después de la fecha de vencimiento impresa (**EXP**) o cuando haya pasado la fecha de vencimiento desde la apertura del frasco, lo que suceda primero. Para obtener instrucciones sobre cómo determinar la fecha de vencimiento desde la apertura del frasco, consulte las *Instrucciones de uso de la solución de control*.

Cuidado y almacenamiento

Almacene el medidor, las tiras de prueba, la solución de control y otros elementos en el estuche para protegerlos contra los líquidos, el polvo y la suciedad. Evite que entren polvo, suciedad, sangre, solución de control y cualquier otra sustancia en el puerto de prueba de la tira o en el compartimiento de la batería del medidor. **No** guarde el medidor en un sitio en el que pueda aplastarse (p. ej., un bolsillo trasero, un cajón, el fondo de una bolsa, etc.).

Guárdelo en un lugar seco a temperatura ambiente entre 36 °F (2 °C) y 86 °F (30 °C). **No lo refrigere ni congele.**

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Configuración del medidor

1. Cómo ingresar a la configuración



Comience con el medidor apagado (sin insertar la tira de prueba). Presione y mantenga presionado el botón **(S)** durante al menos 5 segundos hasta que aparezca la pantalla completa y el medidor emita un pitido varias veces. Suelte el botón **(S)**. Aparecerá la hora.

Nota: Si el medidor se apaga en algún momento durante la configuración, vuelva al paso 1 y comience nuevamente.

2. Cómo configurar la hora



Configuración de la hora: La hora parpadea primero. Presione el botón **(S)** si la hora es correcta o presione **(+)** o **(-)** para deslizarse hacia adelante o hacia atrás hasta cambiar al número correcto. Siga presionando el botón **(+)** o **(-)** hasta que aparezca **A** (para AM) o **P** (para PM) junto a la hora. Presione el botón **(S)** para guardar. El medidor emite pitidos y los minutos comienzan a parpadear.

Configuración de los minutos: Presione el botón **(S)** si el minuto es correcto o **(+)** o **(-)** para cambiarlo. Presione el botón **(S)** para guardar. El medidor emite pitidos y el mes y el día aparecen en la pantalla.

3. Cómo configurar la fecha



(Únicamente a modo de ejemplo)

Configuración del mes: El mes parpadea primero. Presione el botón **(S)** si el mes es correcto o **(+)** o **(-)** para cambiarlo. Presione el botón **(S)** para guardar. El medidor emite pitidos.

Configuración del día: El día parpadea. Presione el botón **(S)** si el día es correcto o **(+)** o **(-)** para cambiarlo. Presione el botón **(S)** para guardar. El medidor emite pitidos.

Configuración del año: El año parpadea. Presione el botón **(S)** si el año es correcto o **(+)** o **(-)** para cambiarlo. Presione el botón **(S)** para guardar. El medidor emite pitidos y pasa a la pantalla de configuración de Bluetooth.

Configuración del medidor (continuación)

4. Cómo activar y desactivar la función Bluetooth



El medidor viene con la función Bluetooth activada.

Presione los botones \oplus o \ominus para activar o desactivar la función Bluetooth. Presione el botón S para guardar. El medidor emite pitidos y pasa a la pantalla de configuración de Marcador de evento.

5. Cómo activar y desactivar los marcadores de evento



Los marcadores de evento se utilizan para marcar el resultado de una prueba obtenido durante un evento específico. El medidor viene con la función Marcador de evento activada.

Presione los botones \oplus o \ominus para activar o desactivar la función Marcador de evento.

Se completó la configuración. Vaya al paso 6 para salir de la configuración.

6. Cómo salir de la configuración



Presione y mantenga presionado el botón S hasta que el medidor se apague.

El medidor también se apaga después de 2 minutos de inactividad.

Configuración/Cambio del tipo de animal

Configure el tipo de animal (🐶 perro o 🐱 gato) cuando use el medidor por primera vez.

Si realiza pruebas en más de un animal, asegúrese de que antes de comenzar las pruebas se muestre en la pantalla el tipo de animal correcto.

¡Importante! Si aplica una gota de la muestra (sangre o solución de control) sin haber seleccionado primero el tipo de animal, aparecerá un mensaje de error (consulte la sección *Mensajes de error*).

	<ol style="list-style-type: none">1. Con el medidor apagado, inserte una tira nueva en el puerto de prueba.
	<ol style="list-style-type: none">2. Use los botones \oplus o \ominus para intercambiar entre los símbolos parpadeantes de gato y perro.3. Presione el botón S para guardar el símbolo de animal correcto.
	<ol style="list-style-type: none">4. Aparecerá el símbolo parpadeante de la gota, que indica que el medidor está listo para realizar pruebas.
	<ol style="list-style-type: none">5. Cuando se apaga el medidor, la selección del animal se guarda en la memoria. <p>Nota: Siga los pasos anteriores para cambiar el tipo de animal.</p>


Pruebas de glucosa en la sangre

Antes de realizar la prueba, haga lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones de uso y reúna los suministros para la prueba.
- Asegúrese de que el medidor, las tiras de prueba y la solución de control estén a temperatura ambiente.
- Verifique las fechas que aparecen en el envase de las tiras de prueba y en el frasco de la solución de control. No utilice las tiras de prueba ni la solución de control si están vencidas (consulte las secciones *Aspectos básicos del sistema: tira de prueba* y *Aspectos básicos del sistema: solución de control*).



Cómo obtener una muestra de sangre

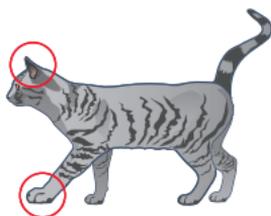

La muestra de sangre capilar se puede extraer de la oreja o de la almohadilla de la pata de perros y gatos. Solicítele a su veterinario instrucciones sobre cómo obtener una muestra de sangre de la oreja o de la almohadilla de la pata.

Las tiras de prueba y las lancetas son para un solo uso. No vuelva a utilizarlas.

Para reducir el riesgo de infección, lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de manipular el medidor, la lanceta, el dispositivo de punción y las tiras de prueba.

Es fundamental mantener el medidor y el dispositivo de punción bien limpios y desinfectados. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de punción, consulte las secciones *Limpieza y desinfección del medidor* y *Limpieza y desinfección del dispositivo de punción*.

Cómo realizar la punción


Para obtener más información, lea las *Instrucciones de uso del dispositivo de punción*.



1. Lávese las manos y lave el sitio de la punción (p. ej., la oreja o la almohadilla de la pata) con agua tibia y jabón para garantizar que los resultados sean exactos. Enjuague y seque bien. También puede usar un paño con alcohol para limpiar el sitio de la punción. Deje que el sitio de la punción se seque bien antes de realizar la prueba. Masajee suavemente el sitio de la punción o aplique un paño tibio para ayudar a que se forme la gota de sangre.



2. Quite el capuchón e inserte la lanceta en el dispositivo de punción. Retire la cubierta de la lanceta para que la aguja quede expuesta. Guarde la cubierta de la lanceta para desechar de manera segura la lanceta usada. Vuelva a colocar el capuchón.

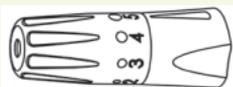

3. Seleccione la profundidad de punción deseada. Tire suavemente hacia atrás el cuerpo del dispositivo hasta que escuche un clic.



4. Coloque firmemente la punta del dispositivo de punción sobre el sitio de la punción y presione el botón disparador. Retire el dispositivo de punción y déjelo a un lado. Deje que se forme una gota de sangre.


¡Importante! Cuando haga una punción en la oreja, se recomienda colocar una pequeña bola de algodón en el lado contrario de la oreja del animal para proteger el dedo de la mano.

5. Después de realizar la prueba, quite el capuchón. Coloque la cubierta de la lanceta que guardó sobre una superficie firme y plana, y presione la punta expuesta de la lanceta dentro de la cubierta de la lanceta. Retire la lanceta y deséchela en un contenedor apropiado.

Cómo realizar la prueba de glucosa en la sangre



1. Retire una tira de prueba del envase y ciérrelo de inmediato. Utilice la tira de prueba rápidamente después de sacarla del envase.

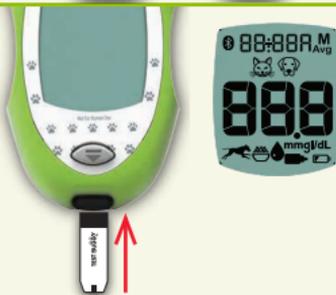


2. **Inserte el extremo de contacto de la tira de prueba (con los bloques orientados hacia arriba) en el puerto de prueba del medidor.** El medidor se enciende y realiza una prueba autoadministrada automática.
Nota: Si se dejó la tira de prueba fuera del envase durante mucho tiempo antes de realizar la prueba, aparecerá un mensaje de error después de insertar esa tira en el medidor. Deseche la tira de prueba. Use una tira nueva para realizar la prueba. Si el medidor no se enciende o aparece un mensaje de error, consulte la sección Resolución de problemas.



3. La pantalla muestra la hora, el símbolo del animal y una gota que parpadea. Asegúrese de que el símbolo del animal coincida con el animal al que le hará la prueba (para obtener información sobre cómo cambiar el tipo de animal, consulte la sección Configuración/Cambio del tipo de animal).
Nota: Si aplica una gota de la muestra sin haber seleccionado primero el tipo de animal, aparecerá un mensaje de error (consulte la sección Mensajes de error).

4. Realice la punción y obtenga una gota de sangre (consulte la sección Cómo obtener una muestra de sangre).

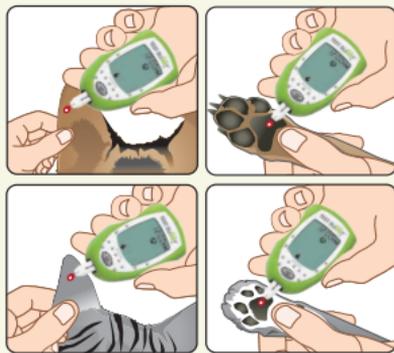

5. Con la tira de prueba todavía colocada en el medidor, **toque la parte de arriba de la gota de sangre con la punta para la muestra de la tira de prueba.** La sangre penetra automáticamente en la tira de prueba.


Cómo realizar la prueba de glucosa en la sangre (continuación)



(Únicamente a modo de ejemplo)

- 6. Mantenga la tira de prueba sobre la gota de sangre hasta que el medidor emita un pitido y aparezcan guiones en la pantalla.** Esto significa que aplicó una cantidad suficiente de sangre y que el medidor está realizando la prueba. Retire la tira de prueba de la gota de sangre.

Nota: Si el medidor no comienza la prueba inmediatamente después de tocar la gota de sangre con la punta para la muestra, deseche la tira de prueba. Repita la prueba con una tira de prueba y una gota de sangre nuevas. Si el problema continúa o aparece un mensaje de error, consulte la sección Resolución de problemas.

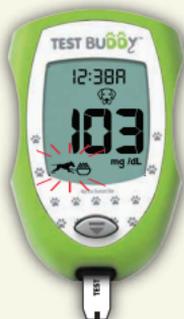

(Únicamente a modo de ejemplo)

- 7. El resultado se muestra en la pantalla cuando finaliza la prueba. El resultado se guarda automáticamente en la memoria con la fecha y la hora.**

Nota: Si retira la tira antes de que se muestre el resultado, se cancela la prueba. Aparece un mensaje de error y el resultado no se guarda en la memoria. Vuelva a realizar la prueba con una tira de prueba nueva y no la retire del medidor hasta que se vea el resultado.

Si se activan los marcadores de evento, los símbolos del marcador de evento comienzan a parpadear. Presione los botones \oplus o \ominus para intercambiar los marcadores de evento y presione el botón S para seleccionar el marcador de evento correcto. *Opcional:* anote el resultado en el registro.



- 8. Sujete el medidor con la tira de prueba orientada hacia abajo. Oprima el botón de liberación de la tira de prueba para desecharla en un contenedor de residuos apropiado. El medidor se apaga.**
- ¡Precaución!** Las lancetas y tiras de prueba usadas se consideran materiales con riesgo biológico. Deséchelas con cuidado en un contenedor apropiado.

Cómo comprender los resultados de las pruebas de glucosa en la sangre

El medidor muestra los resultados de glucosa en la sangre en mg/dl. Esta unidad de medida es predeterminada. No podrá cambiar esta configuración.

El rango de glucosa normal en ayunas en perros y gatos sin diabetes es el siguiente: de 75 a 120 mg/dl.¹

Un veterinario determinará cuál es el rango objetivo de glucosa en la sangre para su perro o gato y con qué frecuencia deben hacerse las pruebas. Si la mayoría de los resultados están dentro del rango objetivo, esto demuestra que tan bien funciona un plan de tratamiento para controlar los niveles de glucosa en la sangre. Mantener los resultados dentro del rango objetivo ayuda a disminuir o eliminar las complicaciones de la diabetes.

NUNCA cambie el plan de tratamiento de su mascota sin consultar con un veterinario.

Pantalla de resultados Lo y Hi (bajos y altos)

Importante: El medidor lee los niveles de glucosa en la sangre que se encuentran entre 20 y 600 mg/dl. Los resultados bajos o altos de glucosa en la sangre pueden indicar que hay una posible afección médica grave.

Si el resultado es inferior a 20 mg/dl, aparecerá **Lo** (bajo) en la pantalla del medidor.



Si el resultado es superior a 600 mg/dl, aparecerá **Hi** (alto) en la pantalla del medidor.



Siempre repita la prueba para confirmar los resultados Lo o Hi (bajos o altos). Si los resultados Lo o Hi continúan apareciendo en la pantalla, comuníquese con el veterinario de inmediato.

Memoria del medidor: cómo ver los resultados

El medidor guarda 1000 resultados de glucosa en la sangre y de pruebas de control con la hora y la fecha. Cuando la memoria está llena, el resultado más nuevo reemplaza al más antiguo.



(Únicamente a modo de ejemplo)

1. Con el medidor apagado, presione y suelte el botón **S**. En el medidor aparecerá el símbolo de la memoria (**M**) y se desplazará por los promedios de 7, 14, 30, 60 y 90 días (**Avg**). Si no hay resultados en la memoria, aparecerán tres guiones.



(Únicamente a modo de ejemplo)

2. Presione y suelte el botón **S** nuevamente para ver el resultado de la prueba de sangre o de control más reciente en la memoria. Los resultados de las pruebas de control muestran el símbolo de control **C**.



(Únicamente a modo de ejemplo)

3. Presione el botón **+** para desplazarse hacia adelante por los resultados. Presione el botón **-** para desplazarse hacia atrás.

Las pruebas marcadas con un marcador de evento muestran el símbolo de marcador de evento en la pantalla.

Memoria del medidor: cómo ver los promedios

La función Promedios le permite ver el promedio de todos los resultados de las pruebas de glucosa en la sangre en un período de 7, 14, 30, 60 y 90 días. Los resultados de la prueba de control no se incluyen en los promedios.



(Únicamente a modo de ejemplo)

Con el medidor apagado, presione y suelte el botón **S**. La pantalla se desplaza por los valores promedio de 7, 14, 30, 60 y 90 días. Si no hay valores promedio, aparecen tres guiones en la pantalla. Si no se presiona ningún otro botón, el medidor se apagará después de transcurridos 2 minutos.

Nota: Los resultados **Lo** (bajos) se incluyen en el promedio como 20 mg/dl. Los resultados **Hi** (altos) se incluyen en el promedio como 600 mg/dl.

Pruebas de control de calidad

El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy tiene dos clases de pruebas de control de calidad para garantizar que el sistema funcione correctamente y que su técnica de prueba sea satisfactoria.

Prueba autoadministrada automática

El medidor realiza una prueba autoadministrada automática cada vez que se inserta correctamente una tira en el puerto de prueba.

El medidor funciona correctamente si sucede lo siguiente:

- aparece la pantalla completa; luego
- aparecen la hora, el símbolo de gato o perro y una gota que parpadea.



Si aparece un mensaje de error, el medidor no realizará la prueba.

Consulte la sección *Resolución de problemas* para ver los mensajes de error y qué significa cada uno.

¡Precaución! Si, cuando se enciende el medidor, faltan segmentos en la pantalla, no use el medidor para realizar la prueba. Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.

Prueba de solución de control

¡Precaución! Use la solución de control Test Buddy ÚNICAMENTE con el medidor Test Buddy y las tiras de prueba Test Buddy. Antes de usarla, lea las Instrucciones de uso que se proporcionan junto con el frasco de solución de control Test Buddy.

Realice pruebas de control en las siguientes situaciones:

- a modo de práctica antes de usar el sistema para realizar la prueba de glucosa en la sangre por primera vez a fin de garantizar que la técnica de prueba sea satisfactoria;
- después de abrir un envase nuevo de tiras de prueba;
- ocasionalmente, cuando un envase de tiras de prueba está usado;
- si un envase de tiras de prueba quedó abierto o expuesto a condiciones extremas de calor, frío o humedad;
- siempre que sea necesario verificar el funcionamiento del sistema;
- si los resultados parecen ser inusualmente altos o bajos;
- si sospecha que el medidor está dañado (p. ej., se cayó, aplastó o humedeció).

Es importante que realice las pruebas de control con más de un nivel de solución de control. Hay tres niveles de solución de control Test Buddy disponibles. Para informarse sobre cómo obtener los diferentes niveles de solución de control, comuníquese con Atención al cliente.

¡Advertencia! Los rangos impresos en la etiqueta del envase de las tiras de prueba corresponden a los **resultados de la prueba de control únicamente** y no son los niveles recomendados para la glucosa en la sangre de su mascota. **No beba ni permita que su mascota beba la solución de control.**

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Cómo realizar una prueba de solución de control

1. Verifique las fechas de vencimiento de la solución de control y de la tira de prueba

No use la solución de control después de su fecha de vencimiento. Deseche la solución de control después de la fecha de vencimiento impresa (**EXP**) o cuando haya pasado la fecha de vencimiento desde la apertura del frasco, lo que suceda primero (consulte las *Instrucciones de uso de la solución de control* para obtener información sobre cómo determinar la fecha de vencimiento desde la apertura del frasco).

No use las tiras de prueba después de su fecha de vencimiento. Deseche las tiras de prueba después de la fecha de vencimiento impresa (**EXP**) o cuando haya pasado la fecha de vencimiento desde la apertura del envase, lo que suceda primero (consulte las *Instrucciones de uso de las tiras de prueba* para obtener información sobre cómo determinar la fecha de vencimiento desde la apertura del envase).

Fecha de vencimiento impresa

EXP 2023-10-31

8 de mayo de 2023

Cuando abra un frasco de solución de control o un envase de tiras de prueba nuevos, escriba la fecha en la etiqueta.

(Únicamente a modo de ejemplo)

2. Prepare la solución de control



Lávese las manos y séquelas bien.



Gire o dé vuelta suavemente el frasco varias veces para mezclar bien la solución de control. **No lo agite.**

3. Inserte una tira de prueba en el medidor



Retire una tira de prueba del envase y ciérrelo de inmediato. Utilice la tira de prueba rápidamente después de sacarla del envase.

Inserte la tira de prueba en el medidor. El medidor se enciende y realiza una prueba autoadministrada automática. Verifique que aparezca el símbolo del tipo de animal (perro o gato) en la pantalla (consulte la sección *Configuración/Cambio del tipo de animal*).

¡Precaución! Si faltan segmentos en la pantalla, no use el medidor para realizar la prueba. Consulte la sección *Prueba autoadministrada automática para obtener más información*.

Si el medidor no se enciende o aparece un mensaje de error, consulte la sección *Resolución de problemas*.

Cómo realizar una prueba de solución de control (continuación)

4. Aplique la solución de control



Quite la tapa y dé vuelta el frasco. Deje caer una gota en una toallita de papel limpia. Limpie la punta del frasco con la toallita de papel y deséchela.



Suavemente deje caer otra gota en un trozo pequeño de papel de aluminio o envoltorio plástico transparente sin usar. Vuelva a tapar bien el frasco de solución de control.



Toque la parte de arriba de la gota de solución de control con la tira de prueba. No coloque la solución de control sobre la tira de prueba. Espere a que la tira de prueba absorba la solución de control.



Mantenga la tira de prueba sobre la gota de solución de control hasta que el medidor emita un pitido y aparezcan guiones en la pantalla. Esto significa que el medidor está realizando la prueba. Retire la tira de prueba de la gota de solución de control.

Si el medidor no emite ningún pitido ni comienza a realizar la prueba poco después de absorber la muestra, deseche la tira de prueba. Repita la prueba con una tira de prueba nueva. Si el problema continúa, consulte la sección *Resolución de problemas*.

Cómo realizar una prueba de solución de control (continuación)

5. Lea el resultado



(Únicamente a modo de ejemplo)

El resultado se muestra en la pantalla con el símbolo de control  cuando finaliza la prueba.

Nota: Si retira la tira de prueba del medidor antes de que se muestre el resultado, se cancela la prueba. Aparece un mensaje de error y el resultado no se guarda en la memoria. Vuelva a realizar la prueba con una tira de prueba nueva y no la retire del medidor hasta que se vea el resultado.



LOT	R-758
EXP	2023/10/31
1	31-61 mg/dL
2	87-117 mg/dL
3	254-344 mg/dL



(Únicamente a modo de ejemplo)

Compare el resultado con el rango de control impreso en la etiqueta del envase de las tiras de prueba para el nivel de solución de control que esté usando. Si el resultado se encuentra dentro del rango, se puede utilizar el sistema para realizar una prueba de sangre. Si el resultado se encuentra fuera del rango, repita la prueba con una tira nueva.

Si el resultado continúa fuera del rango, no use el sistema para realizar la prueba de sangre. Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.



Una vez que se muestre el resultado, sostenga el medidor con la tira de prueba orientada hacia abajo. Presione el botón de liberación para liberar la tira de prueba y desecharla en un contenedor de residuos apropiado.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Limpieza y desinfección del medidor

- La limpieza elimina la sangre y la suciedad del medidor. La desinfección elimina la mayoría de los posibles agentes infecciosos (bacterias o virus), aunque no todos, del medidor, incluso los patógenos contenidos en la sangre.
- Limpie el medidor de inmediato si ve que tiene sangre o se observa que está sucio. Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipular el medidor, las tiras de prueba, las lancetas o el dispositivo de punción, ya que el contacto con la sangre representa un riesgo de infección.
- **No** limpie el medidor durante una prueba.
- Limpie y desinfecte el medidor al menos una vez a la semana. El medidor se puede limpiar y desinfectar una vez a la semana durante hasta 5 años.
- **Use únicamente paños de limpieza Super Sani-Cloth® de PDI** (n.º de registro de la EPA 9480-4). Otros desinfectantes no se sometieron a prueba y pueden dañar el medidor. Los paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI pueden adquirirse en los siguientes sitios: Amazon.com, Officedepot.com (o su tienda local de Office Depot) o Walmart.com.
- Los paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI se sometieron a prueba en el medidor durante un total de 260 ciclos de limpieza y desinfección, lo que equivale a limpiar y desinfectar el medidor una vez a la semana durante 5 años. La vida útil del medidor es de 5 años.
- Limpie y desinfecte el medidor antes de desecharlo de acuerdo con las normas locales para la eliminación de desechos.

Limpieza y desinfección del medidor (continuación)

Para limpiar el medidor, siga los siguientes pasos:

1. Lávese bien las manos con agua y jabón.
2. Asegúrese de que el medidor esté apagado (OFF) y de que no haya una tira de prueba insertada.
3. Use paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI nuevos para limpiar toda la superficie externa del medidor con tres movimientos circulares y presión moderada en las partes frontal, posterior, superior, inferior, el costado izquierdo y el costado derecho del medidor. Deseche los paños de limpieza usados.
4. Deje secar bien el medidor al aire antes de usarlo para las pruebas.
5. Lávese bien las manos al finalizar.
6. Realice una prueba autoadministrada automática para verificar que el medidor funcione correctamente (consulte la sección *Pruebas de control de calidad*).

Para desinfectar el medidor, siga los siguientes pasos:

1. **Siempre limpie el medidor inmediatamente antes de desinfectarlo** (consulte las instrucciones anteriores).
2. Use paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI nuevos para limpiar la parte externa del medidor. **Asegúrese de que toda la superficie permanezca húmeda durante 2 minutos.** Asegúrese de que no penetre ningún líquido en el puerto de prueba ni en otras aberturas.
3. Después de transcurrido ese tiempo, deje secar bien el medidor al aire antes de usarlo para las pruebas.
4. Lávese bien las manos al finalizar.
5. Realice una prueba autoadministrada automática para verificar que el medidor funcione correctamente (consulte la sección *Prueba autoadministrada automática*). Si aparece un mensaje de error en la pantalla, consulte la sección *Mensajes de error*.

¡Importante! Deje de usar el medidor y comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda si sucede lo siguiente:

- la pantalla del medidor se ve borrosa o no se ven algunos segmentos;
- las marcas en el medidor o en la etiqueta de la parte posterior se están borrando o desaparecieron;
- es difícil presionar los botones o estos no funcionan;
- no puede insertar un tira en el puerto de prueba.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Limpieza y desinfección del dispositivo de punción

- Limpie el dispositivo de punción de inmediato si ve que tiene sangre o está sucio.
- Retire la lanceta del dispositivo de punción antes de limpiarlo.
- Limpie y desinfecte el dispositivo de punción al menos una vez a la semana. El dispositivo de punción se puede limpiar y desinfectar una vez al día durante 3 años.
- **Use únicamente paños de limpieza Super Sani-Cloth® de PDI** (n.º de registro de la EPA 9480-4). Otros desinfectantes no se sometieron a prueba y pueden dañar el dispositivo de punción.
- Los paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI se sometieron a prueba en el dispositivo de punción durante un total de 1095 ciclos de limpieza y desinfección, lo que equivale a limpiar y desinfectar el dispositivo de punción una vez al día durante 3 años.

Para limpiar el dispositivo de punción, siga los siguientes pasos:

1. Lávese bien las manos con agua y jabón.
2. Limpie bien toda la superficie externa del dispositivo de punción con un paño de limpieza Super Sani-Cloth; para ello, realice 3 movimientos circulares. Deseche el paño usado.

Para desinfectar el dispositivo de punción, siga los siguientes pasos:

1. **Siempre limpie el dispositivo de punción inmediatamente antes de desinfectarlo** (consulte las instrucciones anteriores).
2. Saque un paño de limpieza Super Sani-Cloth nuevo y limpie bien toda la superficie externa del dispositivo de punción; para ello, realice 3 movimientos circulares. Asegúrese de repasar toda la superficie del dispositivo de punción.
3. Con paños nuevos, si fuera necesario, **dé golpecitos sobre toda la superficie externa del dispositivo de punción para asegurarse de que permanezca húmeda durante 2 minutos**. Deseche los paños usados.
4. Deje secar bien el dispositivo de punción al aire antes de usarlo.
5. Tire suavemente hacia atrás el cuerpo del instrumento y presione el botón disparador. Escuchará un clic si el dispositivo de punción funciona correctamente.
6. Lávese bien las manos al finalizar.


¡Importante! Deje de usar el dispositivo de punción y comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda si sucede lo siguiente:

- Las marcas en el dispositivo de punción están desapareciendo.
- Es difícil presionar el botón disparador.
- No se puede volver a colocar el capuchón.
- El cuerpo del dispositivo no hace clic cuando se lo tira suavemente hacia atrás.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Cómo cambiar la batería

Cuando la batería está baja, aparece el símbolo de batería . Se pueden realizar unas 50 pruebas antes de que se agote la batería. Si no hay energía suficiente para realizar una prueba, el medidor emitirá un pitido una vez antes de apagarse. Para cambiar la batería, tenga en cuenta lo siguiente:

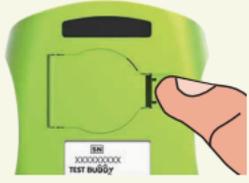 	<ol style="list-style-type: none">1. Levante la tapa del compartimento para la batería.2. Sostenga el medidor en una mano con el compartimento para la batería orientado hacia abajo sobre la palma de la otra mano. La batería caerá. Deseche la batería de acuerdo con las normas locales para la eliminación de desechos.
	<ol style="list-style-type: none">3. Inserte una batería de litio CR2032 3V nueva con el extremo + hacia arriba. Cierre el compartimento para la batería.
	<ol style="list-style-type: none">4. Encienda el medidor. Verifique la hora y la fecha, y vuelva a configurarlas si fuera necesario (consulte la sección <i>Configuración del medidor</i>). Si el medidor no se enciende, verifique si la batería está instalada correctamente. Si no está bien colocada, retírela y vuelva a colocarla. Encienda el medidor. Si el medidor aún no enciende, comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.

¡ADVERTENCIA!

- La batería puede explotar si no se usa de manera adecuada o se la reemplaza de manera incorrecta. **No arroje la batería al fuego. No desarme ni intente recargar la batería.**
- La batería puede ser perjudicial si se traga. Manténgala fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Resolución de problemas

Problema	Motivo	Acción
El medidor no se enciende después de insertar una tira de prueba.	La tira de prueba se insertó al revés o de atrás para adelante	Retire la tira de prueba. Vuelva a colocarla correctamente.
	La tira de prueba no se introdujo por completo	Retire la tira de prueba. Vuelva a colocarla completamente en el medidor.
	Error de la tira de prueba	Repita con una tira de prueba nueva.
	Batería agotada o sin batería	Cambie la batería.
	Batería colocada al revés	Vuelva a colocar la batería con el extremo + hacia arriba.
	Error del medidor	Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
El medidor no emite ningún pitido y la prueba no comienza después de aplicar la gota (de sangre o de solución de control) de la muestra.	La gota de la muestra es demasiado pequeña	Repita la prueba con una tira de prueba nueva y una gota de muestra más grande.
	La gota de la muestra se aplicó después de 2 minutos de apagado	Repita la prueba con una tira de prueba nueva. Aplique la gota de la muestra antes de que transcurran 2 minutos de insertar la tira de prueba.
	Problema con la tira de prueba o con el medidor	Repita con una tira de prueba nueva. Si aún no comienza la prueba, comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Mensajes de error

Pantalla	Motivo	Acción
 E-1	Error de temperatura: la temperatura es demasiado baja o demasiado alta durante la prueba.	Lleve el medidor y las tiras de prueba a un área dentro del rango de funcionamiento del sistema (de 50 °F [10 °C] a 104 °F [40 °C]) y espere 10 minutos para que el sistema pueda ajustarse a la temperatura nueva antes de volver a realizar la prueba.
 E-2	Muestra no detectada o Muestra aplicada antes de seleccionar el tipo de animal (gato o perro)	Asegúrese de seleccionar el tipo de animal (gato o perro). Repita la prueba con una tira de prueba nueva y una muestra más grande.
 E-3	Tira de prueba usada o Tira de prueba fuera del envase durante mucho tiempo o Muestra colocada sobre la tira de prueba	Repita la prueba con una tira nueva. Asegúrese de que la punta para la muestra de la tira de prueba toque la parte de arriba de la gota de la muestra. Si vuelve a aparecer el error, comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
 E-4	Error del medidor	No use el medidor. Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
 E-5	Error de la tira de prueba o Uso de la tira de prueba incorrecta o Resultado muy alto de glucosa en la sangre	Asegúrese de usar las tiras de pruebas Test Buddy. Repita la prueba con una tira nueva. Si vuelve a aparecer el error, comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Mensajes de error (continuación)

Pantalla	Motivo	Acción
	Se retiró la tira durante la prueba	Repita la prueba con una tira nueva. Asegúrese de que el resultado aparezca en la pantalla antes de retirar la tira de prueba del medidor.
	Error de comunicación	No use el medidor. Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
	Batería baja 	Cambie la batería.
	Pantalla rota	No use el medidor. Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
	Resultado alto fuera del rango (>600 mg/dl)	<p>¡ADVERTENCIA! Repita la prueba con una tira nueva. Si los resultados Lo o Hi (bajos o altos) continúan apareciendo, comuníquese con el veterinario de inmediato.</p>
	Resultado bajo fuera del rango (<20 mg/dl)	

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Especificaciones del sistema

Rango de resultados:	de 20 a 600 mg/dl
Tamaño de la muestra:	mínimo de 0,5 microlitros (0,5 µl)
Muestra:	sangre capilar completa recién extraída, sangre venosa completa recolectada en un tubo con EDTA, o solución de control
Tiempo de la prueba:	alrededor de 10 segundos
Valor del resultado:	valores en plasma
Método de ensayo:	amperométrico
Suministro eléctrico:	una batería de litio CR2032 3V (no recargable)
Duración de la batería:	aproximadamente 1000 pruebas o 1 año
Apagado automático:	después de dos minutos de inactividad
Peso:	1,7 oz (48 g aprox.)
Tamaño:	3,41" x 2,16" x 0,66" (8,6 cm x 5,5 cm x 1,67 cm)
Tamaño de la memoria:	1000 resultados de glucosa en la sangre y de pruebas de control con la hora y la fecha

Rango de funcionamiento (medidor y tiras de prueba) (use únicamente dentro de las condiciones ambientales especificadas):

Temperatura:	de 50 °F a 104 °F (de 10 °C a 40 °C)
Humedad:	de 10 % a 90 % (sin condensación)
Hematocrito:	de 20 % a 60 %
Altitud:	10 150 pies (3100 m aprox.)

Composición química

Tiras de prueba Test Buddy:

glucosa deshidrogenasa-FAD (*Aspergillus sp.*), mediadores, amortiguadores y estabilizadores

Solución de control Test Buddy:

agua, d-glucosa, amortiguadores, agentes que aumentan la viscosidad, sales, colorantes y conservantes

Acerca de la aplicación Test Buddy™

La aplicación Test Buddy permite que el medidor para monitoreo de mascotas Test Buddy cargue de manera inalámbrica los resultados de la prueba de glucosa en la sangre en su dispositivo móvil (p. ej., teléfono inteligente o tableta). Debe activar la función Bluetooth SMART en el medidor e instalar la aplicación Test Buddy en su dispositivo móvil. El medidor puede vincularse con hasta cuatro (4) dispositivos móviles.

Visite www.testbuddymeter.com para obtener más información sobre lo siguiente:

- Aplicación Test Buddy.
- Lista de dispositivos móviles compatibles.
- Instrucciones para descargar la aplicación y vincular el medidor a su dispositivo móvil.

Acerca de Bluetooth SMART®

El medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy usa Bluetooth SMART® para conectarse de manera inalámbrica (vincularse) con la aplicación Test Buddy en dispositivos móviles a fin de transmitir los resultados de la prueba desde la memoria del medidor.

El medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy contiene el número de identificación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): 2ADD8-PET-01. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento depende de estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar una interferencia perjudicial;
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida; incluso la interferencia que pueda causar un mal funcionamiento.

Nota: Este medidor se sometió a prueba y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para brindar una protección adecuada contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este medidor genera, usa y puede irradiar energía por radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si este medidor provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse al apagar y encender el medidor, intente corregir la interferencia; para ello, tome una o más de las siguientes medidas:

- Aleje el medidor de la antena de radio o de televisión.
- Aleje la antena de radio o de televisión del medidor.

Si sigue teniendo problemas, comuníquese con Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna antena o transmisor.

Los cambios o las modificaciones que se realicen en el dispositivo sin la aprobación expresa de Trividia Health podrían anular la autorización del usuario para utilizar el dispositivo.

Seguridad y compatibilidad electromagnética del sistema

El medidor Test Buddy se sometió a prueba y cumple con los requisitos de emisión electromagnética e inmunidad según se especifica en la norma 60601-1-2 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, por sus siglas en inglés), edición 4.0. La emisión electromagnética del medidor es baja. No se prevé interferencia del medidor en otros equipos electrónicos. Debería evaluarse el entorno electromagnético antes de utilizar el dispositivo. No use el medidor en un entorno muy seco, en especial, en presencia de materiales sintéticos. No use el medidor Test Buddy cerca de fuentes de radiación electromagnética potentes, ya que estas pueden interferir en su correcto funcionamiento. No use equipos eléctricos, incluidas las antenas, a una distancia inferior a 12 pulgadas (30 cm) de cualquier pieza del medidor Test Buddy.

Bibliografía

1. Bruyette, D. "Diabetes Mellitus in Dogs and Cats." Merck Veterinary Manual, Jul. 2019. www.merckvetmanual.com/endocrine-system/the-pancreas/diabetes-mellitus-in-dogs-and-cats#. Consultado el 30/06/2020.

Garantía limitada de por vida

Trividia Health, Inc. ofrece la siguiente garantía al comprador original del medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy:

1. Trividia Health garantiza que este medidor no presenta defectos de materiales ni de fabricación en el momento de la compra. Si en algún momento el medidor deja de funcionar, Trividia Health lo reemplazará por un medidor equivalente, según su criterio, sin costo alguno para el comprador. Esta garantía no cubrirá las fallas del medidor debidas al maltrato o por no haberse utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso.
2. Esta garantía no cubre la batería suministrada con el medidor.
3. No desarme el medidor. Esta acción anulará la garantía y hará que el medidor muestre resultados falsos.
4. La duración de la garantía implícita, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito determinado, se limitará a su vida útil para uso del usuario original de conformidad con cualquier ley estatal en contrario.
5. Trividia Health se exime de toda responsabilidad por daños incidentales o emergentes derivados del incumplimiento de las garantías expresas o implícitas, incluso la garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito determinado del medidor. Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que las limitaciones o la exclusión antes mencionadas no rijan en su caso.
6. Esta garantía otorga al usuario derechos legales específicos, y el usuario también puede tener otros derechos que varían según el estado. Si es necesario, el representante de Atención al cliente de Trividia Health podrá brindarle información detallada sobre los procedimientos para devolver el medidor.



TEST BUDDY™

Presentado por: **Healthy Tracks™**
for Pets 

Atención al cliente • 1-800-803-6025
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m.,
hora del este
www.testbuddymeter.com

Fabricado por:

 **TRIVIDIA**
HEALTH.

2400 NW 55th Court
Fort Lauderdale, FL 33309 EE. UU.

© 2021 Trividia Health, Inc. Test Buddy, Healthy Tracks for Pets y el logotipo de Trividia Health son marcas comerciales de Trividia Health, Inc. La marca denominativa y los logotipos Bluetooth™ son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Trividia Health, Inc. se efectúa bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios. XE4HTK03S Rev. 2

